

Test antigen pentru depistarea COVID 19, HOTGEN

(instructiuni utilizare)

Acest kit este utilizat pentru determinarea diagnosticului in vitro al antigenului noului coronavirus. Poate fi folosit pentru investigarea rapida a virusului SARS-CoV-2 de indivizi suspectati de COVID-19 in primele sapte zilele de la debutul simptomelor, dar si de indivizi fara simptome. Copiii si tinerii sub 18 ani ar trebui sa fie supravegheati de un adult.

Kitul contine: instructiuni de utilizare, caseta test antigen, ser, dispozitiv steril de unica folosinta, sac risc biologic.

Mod de utilizare.



1. Spalati-va pe maini inainte de a utiliza testul antigen.



2. Cititi cu atentie instructiunile de utilizare



3. Scanati QR codul si vizionati videoclipul



4. Desigilati dispozitivul steril de unica folosinta, fara sa atingeti capatul.




5. Inserati cu grija circa 1.5 cm in nara pana cand se simte rezistenta. Sub presiune moderata, tamponatiu suprafata din nara de 4 pana la 6 ori timp de cel putin 15 secunde.



6. Repetati operatiunea si in cealalta nara.



7. Deschideti tubul cu ser la capatul mai mare si introduceti dispozitivul steril cu proba in interior.

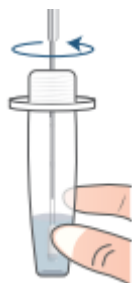

8. Imbibati proba in ser circa 15 secunde, amestecati si tamponati de mai multe ori si stangeti capacul tamponului de 3 ori.

9. Cand scoateti dispozitivul din ser, strangeti tubul din lateral, astfel incat lichidul sa ramana in interior.



10. Inchideti apoi tubul cu capac.



11. Deschideti caseta de test si asezati-o pe o suprafata plana.



12. Picurati 4 picaturi din tubul cu proba in caseta de testare.



13. Dupa 15 minute la temperatura camerei, rezultatul incepe sa apara. Un rezultat dupa 30 minute este invalid.



14. Dupa test, puneti toate accesoriile in sacul oferit si inchideti ermetic. Testul nu poate fi reutilizat.




15. Spalati-va pe maini dupa utilizare.

Interpretarea testului:

- **Pozitiv:** Daca apar doua benzi rosii in caseta de test, dupa cum se vede in figura 1: o dunga de culoare rosie in dreptul literei C si o dunga rosie in dreptul literei T, atunci rezultatul testului este pozitiv, deci sunteti suspect in infectarea cu COVID-19

Fig.1

Pozitiv

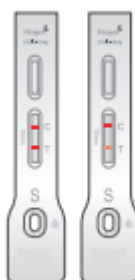

- **Negativ:** Daca apare o singura dunga rosie in dreptul literei C, dupa cum se vede in figura 2, atunci rezultatul testului este negativ sau incarcatura virala este prea mica pentru a fi recunoscuta de test.

Fig.2

Negativ



- **Invalid:** Dupa cu se vede in figura 3, daca in caseta de test nu apare nicio dunga de culoare rosie (in zona de control C), sau apare o dunga de culoare rosie in dreptul literei T, atunci rezultatul testului este invalid. Daca rezultatul este invalid, este posibil ca testul sa nu fi fost utilizat corect. Va rugam refaceti testul cu un nou kit, nu inainte de a reciti instructiunile de utilizare.

Fig.3

Invalid

